

	<b>GUIA</b>	<b>VERSION:</b>
		<b>CODIGO: SS-G-03</b>
<b>TOMA, CONSERVACION Y TRANSPORTE DE MUESTRAS PARA ENVIAR AL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA</b>		<b>FECHA:</b>

**TOMA, CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE MUESTRAS PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA CLINICA**

**MUESTRA: MATERIA FECAL**

BACTERIAS DE IMPORTANCIA EPIDEMIOLOGICA	MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO	CONDICIONES DE ENVIO	PROCEDIMIENTO
Salmonella spp. Shigella sp. Vibrio cholerae Escherichia coli O157:H7 Otras bacterias entéricas	Cary Blair: para el envío de muestras de materia fecal y aislamientos de microorganismos Gram negativos enteropatógenos	Temperatura ambiente entre los 18 y 25°C, con un tiempo máximo de 24 horas para su recepción.	Impregnar todo el escobillón que trae el medio de transporte con la muestra de la materia fecal o frotis rectal. -Colocar el escobillón en el medio de transporte -Identificar el medio de transporte con los siguientes datos: nombre del paciente, edad, sexo, fecha y hora de recolección de la muestra -Enviar al laboratorio de Salud Pública Departamental con el respectivo formato (Ver procedimiento SS-P-37)
Campylobacter spp		Temperatura entre 2° y 8° C	

**AREA DE MICROBIOLOGIA**

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ